

オートショックAEDについて

今般、ショックボタンを有さない自動体外式除細動器（オートショック AED）の製造販売が開始されました。操作方法、注意点をお知らせします。



オートショックAEDに表示されているオートショックAEDロゴマーク

1、操作方法

- ①患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要否を判断します。
- ②除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流れ、カウントダウン（例：スリー、ツー、ワン）又はブザーの後に、自動的にショックが実施されます。

2、注意点

- ①これまで各講習を既に受講した方は、オートショックAEDを使用する際にショックボタンが存在しないことに混乱するおそれがあります。
- ②救助者が除細動ショックの際に患者から離れることが遅れた場合、放電エネルギーにより感電するおそれがありますので、特に注意が必要となります。



オートショックAEDの機種例

お問い合わせ先

能代消防署 救急担当

TEL0185-52-3368

二ツ井消防署 救急担当

TEL0185-73-2327